




Small Headless Screws™


Operationstechnik

TriMed Cannulated Screw System™

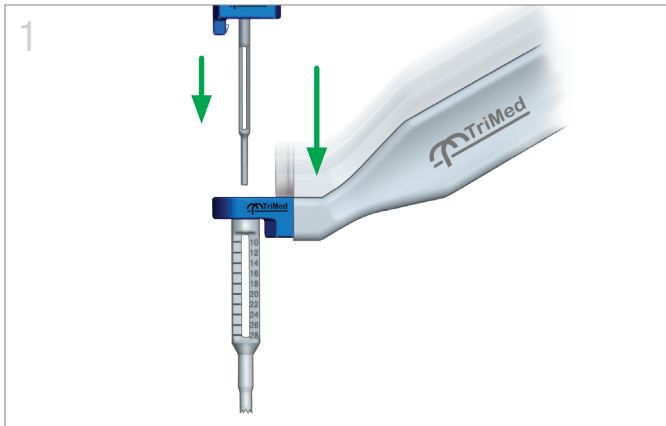


Montage Draht-/Bohrführung

- Die Instrumente sind mit einem Farbencode für verschiedene Schraubendurchmesser versehen.
- Griff an der Bohrkanüle einrasten lassen.
- Drahtführung in die Bohrkanüle schieben.

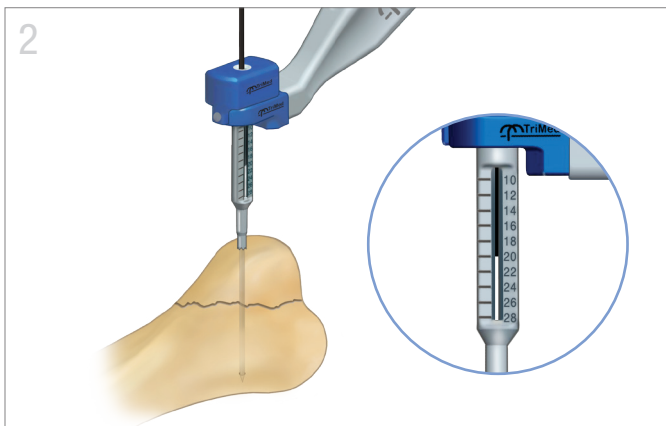


Drahtführung einsetzen

- Führen Sie den passenden Kirschnerdraht bis zur gewünschten Tiefe durch die Führung.
- Kontrollieren Sie die Tiefe des Kirschnerdrahts durch das Fenster in der Führung.
- Bei Bedarf den Kirschnerdraht tiefer einführen, um bei Entfernung des Bohrers eine Loslösung zu vermeiden.

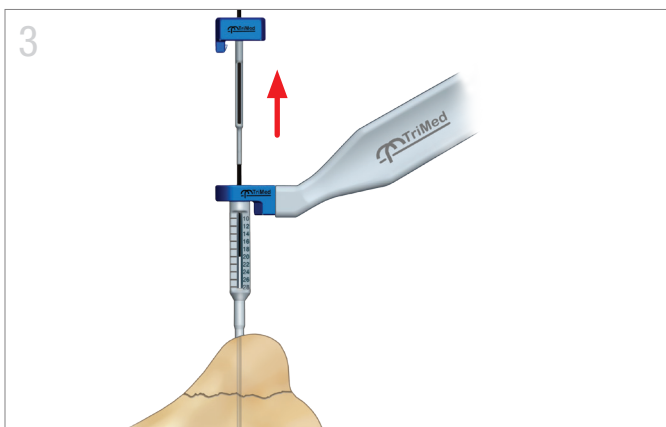


Drahtführung entfernen

- Schieben Sie die Drahtführung aus der Bohrkanüle.
- Wählen Sie eine dem Schraubendurchmesser entsprechende Bohrergröße.

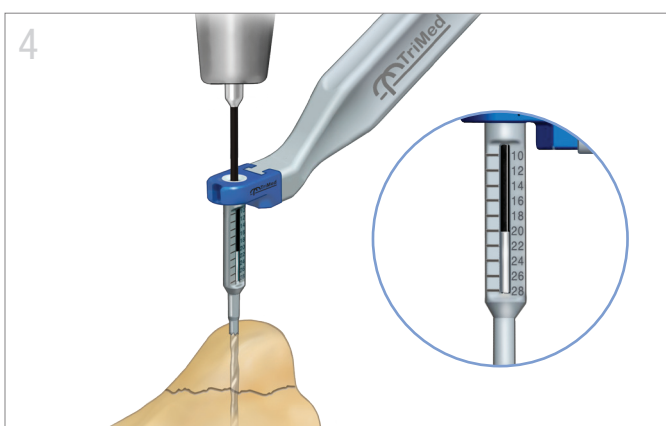

Bohrloch

- Bohren Sie die gewünschte Tiefe über dem Kirschnerdraht.
- Die Tiefe des Bohrlochs kann durch das Führungsfenster kontrolliert werden.
- Entfernen Sie Bohrer und Bohrkanüle.
- Vertiefen Sie das Loch, bis sich der Schraubenkopf in die Kortikalis versenkt.

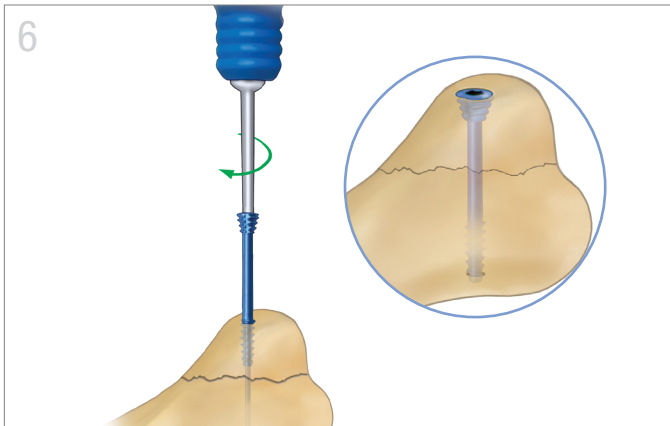


Schraube einsetzen


- Wählen Sie die passende Schraubenlänge.
- Ziehen Sie die Schraube bis zum Anschlag des Knochens an und entfernen Sie den Kirschnerdraht.

TIPPS

- 1 Für 3,5 mm Schrauben mit 34 mm Länge oder weniger lässt sich die Tiefe an der Zahl auf der Fensterführung nahe der unteren Kirschnerdraht- oder Bohrermarkierung ablesen.
- 2 Für 3,5 mm Schrauben mit 34 mm Länge oder mehr wird die Tiefe durch Zugabe von 20 mm zur Zahl auf der Fensterführung nahe der oberen Kirschnerdraht- oder Bohrermarkierung bestimmt.

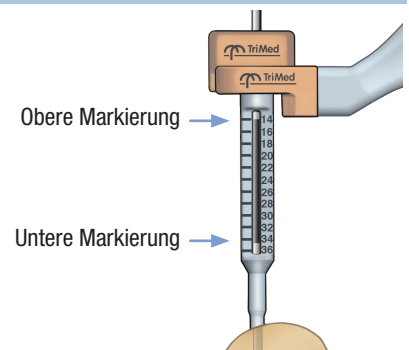


FÜR SELBSTBOHRENDE 1,7 mm KOMPRESSIONSSCHRAUBEN

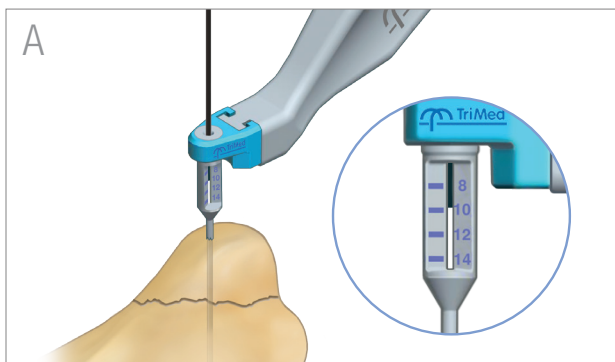

Drahtführung einsetzen

- Lassen Sie die Drahtführung am Griff einrasten.
- Positionieren Sie die Vorrichtung am gewünschten Ort.
- Führen Sie den Kirschnerdraht bis zur gewünschten Tiefe durch die Führung.
- Kontrollieren Sie die Tiefe des Kirschnerdrahts durch das Fenster in der Führung.


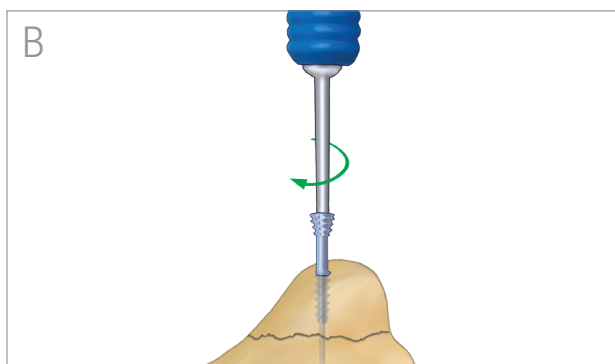


Schraube einsetzen

- Entfernen Sie die Drahtführung vom K-Draht.
- Wählen Sie die passende Schraubenlänge.
- Ziehen Sie die Schraube bis zum Anschlag des Knochens an und entfernen Sie den Kirschnerdraht.

Selbstschneidende kanülierte Kompressionsschrauben

Schrauben sind in ihrer tatsächlichen Größe abgebildet:

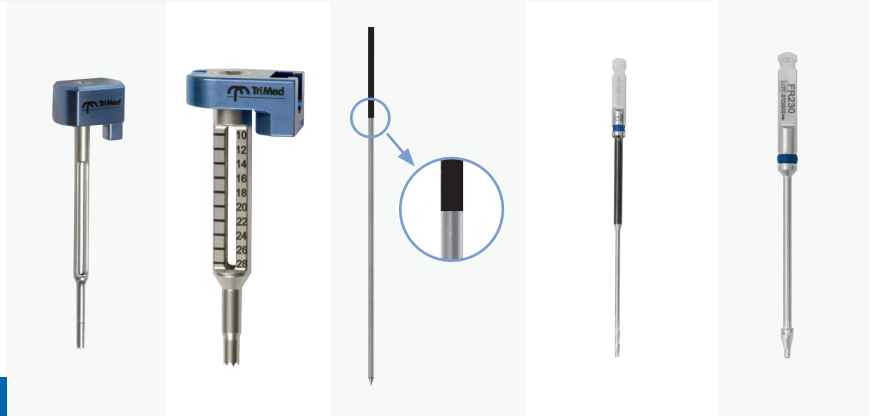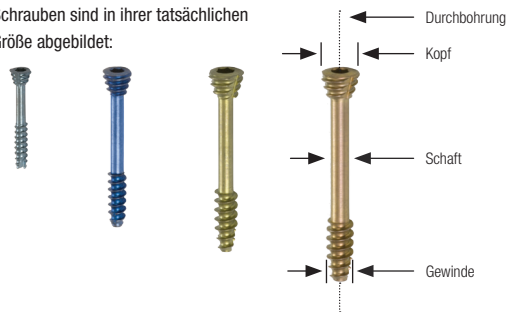

Durchmesser						Drahtführungen	Bohrkanüle	Drähte	Bohrer	Senker
Schrauben	Längen	Faden	Durchbohrung	Schaft	Kopf					
1,7 C17xx	6–14 mm*	1,7 mm	0,7 mm	1,2 mm	2,6 mm	WGUIDE-1,7	n/a	WIRE-0,7/080	[selbstbohrend]	n/a
2,3 C23xx	10–28 mm*	2,3 mm	0,8 mm	1,6 mm	3,3 mm	WGUIDE-2,3	CANNULA-2,3	WIRE-0,8/120	DRILL-1,6CL	CSINK-2,3
3,0 C30xx	10–36 mm*	3,0 mm	1,1 mm	2,1 mm	4,3 mm	WGUIDE-3,0	CANNULA-3,0	WIRE-1,1/120	DRILL-2,1CL	CSINK-3,0
3,5 C35xx	20–45 mm*	3,5 mm	1,1 mm	2,4 mm	4,6 mm	WGUIDE-3,5	CANNULA-3,5	WIRE-1,1/120	DRILL-2,4CL	CSINK-3,5

*1 mm Zugaben erhältlich